


Coloplast razvija proizvode i usluge koji olakšavaju život ljudi s vrlo osobnim i privatnim zdravstvenim stanjima. U uskoj suradnji s osobama koje koriste naše proizvode, stvaramo rješenja prilagođena njihovim potrebama. To zovemo intimnom zdravstvenom skrbi.

Naša djelatnost obuhvaća područje zbrinjavanja stoma, pomagala za urologiju i inkontinenciju te zbrinjavanje rana. Poslujemo širom svijeta i zapošljavamo više od 8.500 ljudi.

Rješenje postoji i zove se Brava®

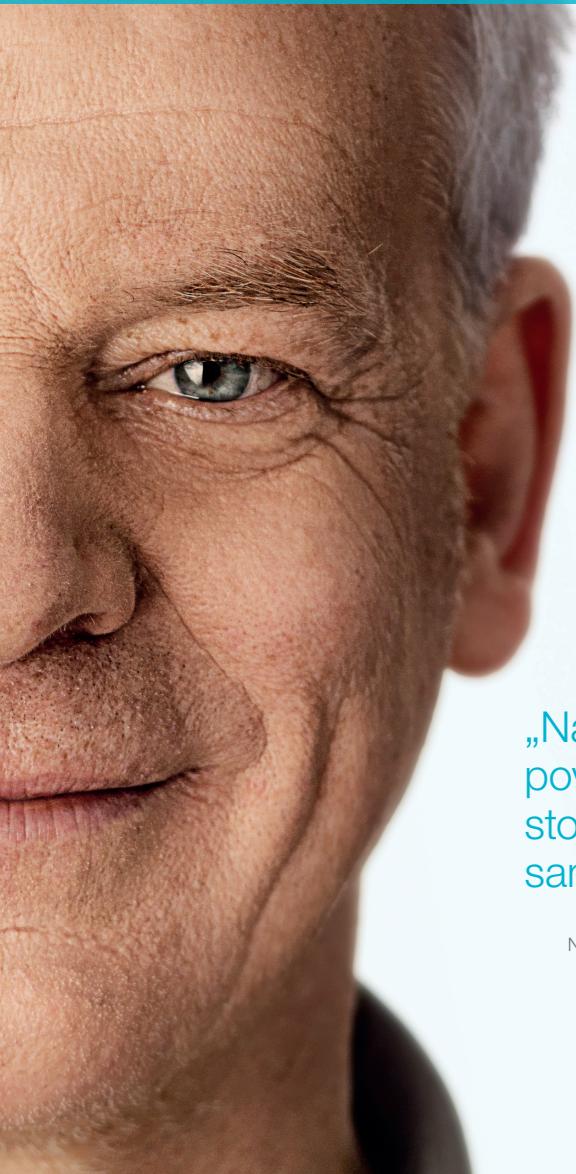

„Naviknuo sam se na povremena propuštanja stoma pomagala - mislio sam da je to normalno.“

Nicholas, pacijent sa stomom od 2010.

Brava® dodatna pomagala za zbrinjavanje stome

Smanjuju propuštanje stoma pomagala i pružaju više
njegu koži oko stome

Ljudi imaju različite oblike tijela i različite potrebe koje zahtijevaju individualna rješenja. Dodatna pomagala mogu pomoći kako bi svaka osoba našla rješenje baš za sebe.




Brava® Modelirajući prsten koji smanjuje propuštanja sadržaja ispod podložne pločice

Novi Brava modelirajući prsten smanjiće mogućnost propuštanja sadržaja ispod podložne pločice stoma pomagala i najizdržljiviji je prsten na tržištu. Stvara nepropustan sloj oko stome i štiti kožu oko stome. Možete ga modelirati prstima kako biste ga oblikovali prema vašoj potrebi.




On upija vlagu pri čemu se ne raspada. Ne isušuje kožu. Pridržava se i za kožu i za podložnu pločicu.

Boja izolacije stome smanjuje rizik propuštanja sadržaja do kože

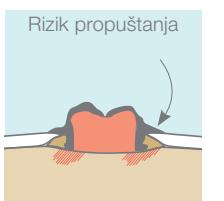


Pucanje prstena

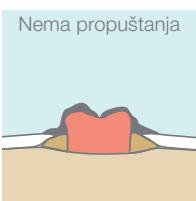

Trajnja izolacija


Brava Modelirajući prsten jednostavno se koristi. Prstima ga prilagodite obliku stome i čvrsto stisnite.

Teškoće u postizanju čvrstog prianjanja pločice

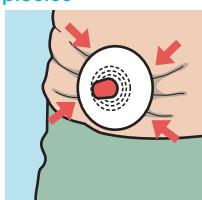


Nabori kože oko stome mogu otežati postizanje čvrstog prianjanja između stome i pomagala.

Prilagodite prsten prema obliku tijela

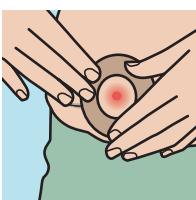

Prilagodite Brava Modelirajući prsten prema obliku svoga tijela.

Postigli ste čvrsto prianjanje

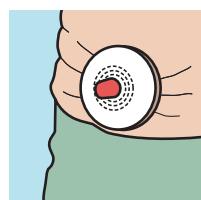

Sada možete postaviti podložnu pločicu na vrh prstena, a s Brava Modelirajućim prstenom dobili ste izolaciju koja je dovoljno čvrsta da smanji propuštanje sadržaja.

Brava® Elastična traka koja prati vaše prirodne pokrete tijela


Mnogi pacijenti sa stomom brinu se hoće li njihova podložna pločica popustiti ili će se rubovi podignuti.

Nova Brava Elastična traka dizajnirana je tako da drži pločicu na mjestu uz istodobno postizanje slobode kretanja. To je posljedica elastičnosti trake. Čak i ako se protežete da biste dohvatali ono na najvišoj polici ili se saginjete da biste si svezali vezice na cipelama, možete biti mirni jer će se traka mricati s vama, a pomagalo će biti na svom mjestu. To podrazumijeva veću sigurnost i dugotrajnost pomagala.




Na donjoj slici prikazano je detaljno kako primijeniti Brava Elastičnu traku. Ako želite pokriti veću površinu rubova pločice, upotrijebite više komada trake.

Pripremite traku za primjenu

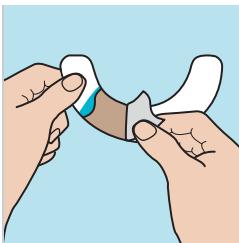

Stavite izravno na kožu

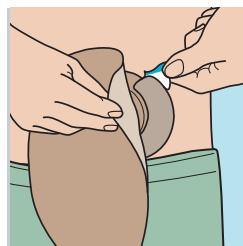

Držite Brava Elastičnu traku objema rukama i povucite veći komad zaštitnog papira. Pridržavajte drugi, manji komad zaštitnog papira sve dok ne zalijepite traku.

Stavite Brava Elastičnu traku na podložnu pločicu i na željeni dio kože. Odstranite zaštitni papir i zalijepite traku na kožu.

Brava® Pasta popunjava nabore na koži oko stome


Neravnine na koži oko stome, nastale uslijed nabora ili ožiljaka, otežavaju čvrsto prianjanje podložne pločice za kožu i time se povećava mogućnost propuštanja sadržaja ispod podložne pločice.

Brava Pasta namijenjena je za popunjavanje udubljenja ili nabora kože oko stome i osigurava tjesno prianjanje podložne pločice. Na taj način sprječava se propuštanja sadržaja ispod podložne pločice i štiti kožu oko stome od sadržaja iz stome.


Možete odabratizmeđu dva oblika Brava Paste: u tubi ili u trakicama.




Teškoće u postizanju čvrstog prianjanja pločice

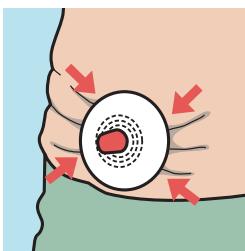

Modelirajte pastu prstima i zagladite površinu

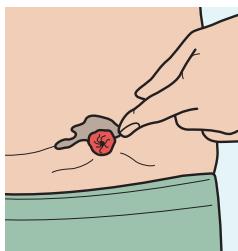

Postigli ste čvrsto prianjanje

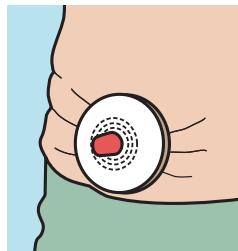

Neravnine i ožiljci na koži oko stome mogu otežati postizanje čvrstog prianjanja između stome i pomagala.

Prilagodite Brava Pastu tako da popuni udubljenja na koži i zagladite površinu.

Sada možete postaviti podložnu pločicu na sloj paste i dobili ste izolaciju koja je dovoljno čvrsta da smanji propuštanje tekućine.

Brava® Deo-lubrikant za stoma vrećice neutralizira neugodne mirise i olakšava pražnjenje vrećice

Riješite dva problema odjednom. Pomoći Brava Deo-lubrikantu za stoma vrećice neutralizirat ćete neugodne mirise i osigurati podmazivanje unutarnje strane vrećice.

Na taj način osigurava se da je sadržaj koji izlazi iz stome uvijek na dnu vrećice, a ne oko stome. Ukoliko koristite otvorene vrećice sa ispustom biti će vam olakšano pražnjenje vrećice.



Primijenite direktno u vrećicu



Stisnite 5-10 ml Brava Deo-lubrikanta za stoma vrećice kroz otvor za stomu ili kod vrećica koje se prazne kroz otvor ispusta. Nježno protrijlite vrećicu kako bi se Deo-lubrikant ravnomjerno rasporedio po stjenkama vrećice. Ponovite nakon svakog pražnjenja vrećice.


Brava® Maramice za zaštitu kože štite vašu kožu od oštećenja i ne ometaju prianjanje podložne pločice

Zaštitni film na koži koji se nanosi putem Brava Maramica za zaštitu kože, štiti vašu kožu od iritacije ispod podložne pločice uzrokovane izlučevinama iz stome i ljepilom. Lagano se primjenjuju, kako se vidi na donjoj slici.

Brava maramice za zaštitu kože su bez alkohola pa ne uzrokuju peckanje na koži. Zaštitni film se suši za nekoliko sekundi, tako da odmah možete staviti novu pločicu. Ne smanjuju moć prianjanja i ne stvaraju slojeve na koži.



Očistite kožu

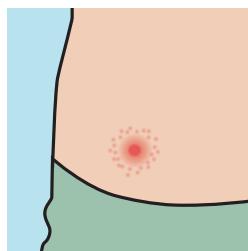


Provjerite je li koža oko stome čista i spremna prije upotrebe Brava Maramice za zaštitu kože.

Izravno primijenite na kožu



Uzmite Brava Maramice za zaštitu kože i nježno nanesite zaštitni sloj na kožu oko stome koji će služiti kao zaštita od tjelesnih izlučevina.

Koža spremna za novu podložnu pločicu

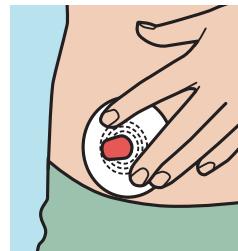


Nedugo zatim, možete postaviti novu podložnu pločicu, a koža je sada zaštićena od tjelesnih izlučevina.

Brava® Puder održava kožu oko stome suhom


Višak vlage je vrlo često razlog iritacije kože oko stome. Brava Puder upija vlagu i održava kožu oko stome suhom. Na taj način smanjuje se mogućnost nadraženost kože oko stome. Nanesite direktno na očišćenu i neoštećenu kožu.

Lagano protresite bočicu. Istisnite malu količinu pudera direktno na kožu oko stome. Pomoću gaze ravnomjerno rasporedite puder. Prije nego stavite podložnu pločicu, višak uklonite tapkanjem ili puhanjem.

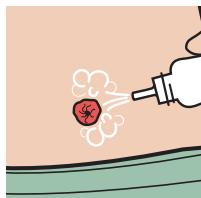

Brava® Elastični remen osigurava položaj podložne pločice

Novi Brava Elastični remen je diskretan i udoban za nošenje jer je izrađen od mekanog i udobnog materijala. Osigurava dodatnu sigurnost tijekom nošenja podložne pločice.

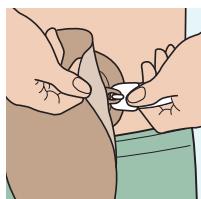

Ostala Coloplast pomagala za zbrinjavanje stome

Maramica za skidanje ljepila

Služi za čišćenje kože oko stome od sadržaja koji je prokurio ili od ostataka ljepila. Štiti i ne isušuje kožu. Nakon čišćenja obavezno operite kožu mlakom vodom i blagim sapunom.



Barrier krema za njegu kože

Služi za njegu neoštećene kože oko stome. Posebno se preporuča za njegu suhe kože. Omekšava kožu i sprječava njen oštećenje. Nanesite vrlo tanak sloj kreme, pričekajte nekoliko trenutaka da se krema upije. Prije nego stavite podložnu pločicu višak kreme uklonite tapkanjem pomoću gaze ili ručnika.



Critic Barrier krema za zaštitu kože

Služi za njegu oštećene kože oko stome. Posebno se preporuča za njegu stanjene, nadražene kože i kod crvenila. Upija vlagu i dobro pranja uz kožu. Nanesite vrlo tanak sloj kreme, pričekajte nekoliko trenutaka da se krema upije. Prije nego stavite podložnu pločicu višak kreme uklonite tapkanjem pomoću gaze ili ručnika.



Brava® dodatna pomagala za zbrinjavanje stome smanjuju propuštanje stoma pomagala i pružaju više njega koži oko stome

Naziv proizvoda	Šifra artikla	Komada po kutiji	HZZO količina	HZZO šifra
Smanjuju propuštanje stoma pomagala				
Modelirajući prsten 2 mm	12030	30 kom		ne odobrava
Modelirajući prsten 4 mm	12042	30 kom		ne odobrava
Elastična traka	12070	20 kom		ne odobrava
Pasta u tubi 60g	2650	1 kom	do 180 g	091812092402
Pasta u trakicama 6g	2655	10 kom	do 180 g	091812092402
Elastični remen	0421	1 kom	do 3 kom	091812092602
Neutralizira neugodne mirise i olakšava pražnjenje vrećice				
Deo-lubrikant za stoma vrećice 8oz (236.6 ml)	12061	1 kom		ne odobrava
Njeguju kožu oko stome				
Maramice za zaštitu kože	12021	30 kom		ne odobrava
Puder 25g	1907	1 kom	do 75 g	091812092502
Ostali Coloplast proizvodi za njegu kože oko stome				
Maramice za skidanje ljepila	4715	30 kom	do 90 kom	091812092802
Barrier krema za njegu kože 60 ml	4720	1 kom		ne odobrava
Critic Barrier krema za zaštitu kože 60 ml	66102	1 kom		ne odobrava

Svi Brava proizvodi mogu se kupiti u slobodnoj prodaji u ljekarnama i specijaliziranim trgovinama. Neke od proizvoda možete dobiti i po preporuci liječnika na tretet HZZO-a.

